




**nosiboo<sup>\*</sup>pro**  
electric nasal aspirator

퀵 스타트 가이드




Nosiboo Pro 사용하기 전, 본 가이드와 사용자 매뉴얼을 자세히 읽어 주시기 바랍니다. 이후의 참조를 위해 본 가이드를 지참해 주세요.  
부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원 080-080-4183)

**Fantastic Two & Nosiboo**

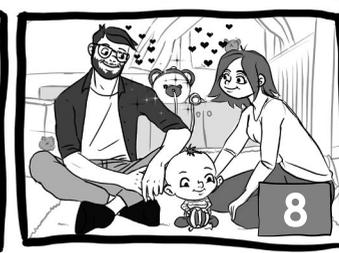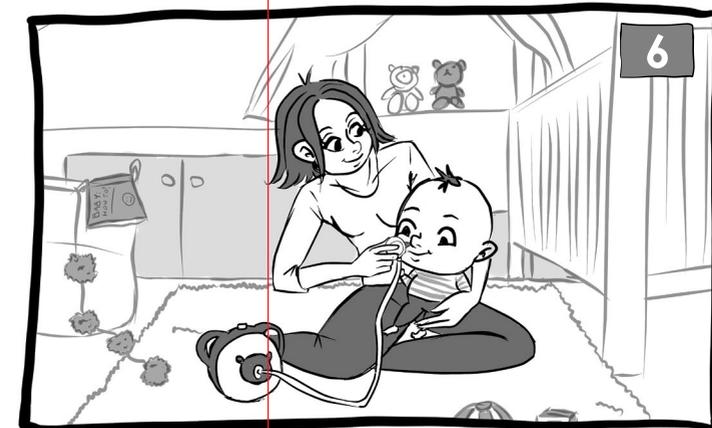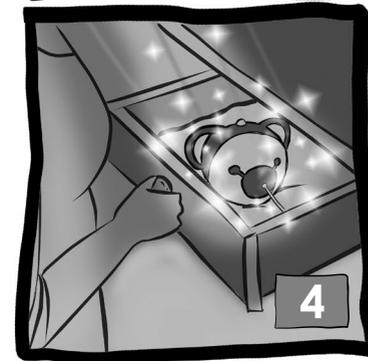

to be continued...

**nosiboo<sup>\*</sup>**  
designed to care

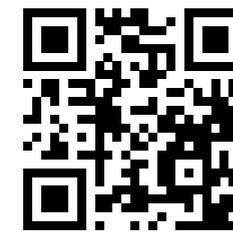

\* 사용자 매뉴얼 / 빠른 가이드 다운로드


A/S 서비스  
사용법, 세척 및 문제 해결에 대한 더 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참고해 주세요.

한국 내의 고객 : nosiboo.kr  
customer@nosiboo.kr  
+82 (0)2-419-3927

# 박스 내부 구성




- 퀵 스타트 가이드
- 사용자 매뉴얼

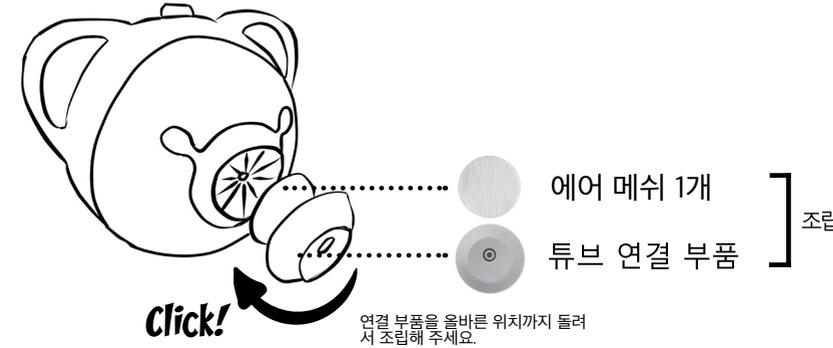


# Nosiboo Pro 사용법

본 기계는 아이들의 코에서 콧물을 제거 하는데에 사용되어 질 수 있습니다. 다른 용도로 사용할 수 없습니다.

## 첫 사용 전

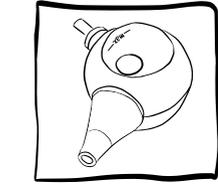


가장 먼저 Colibri 헤드를 세척 및 건조해 주세요.

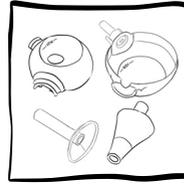

'세척'부분에서 세척방법에 대한 자세한 설명을 참조해주세요.

## Colibri 헤드를 조립하십시오

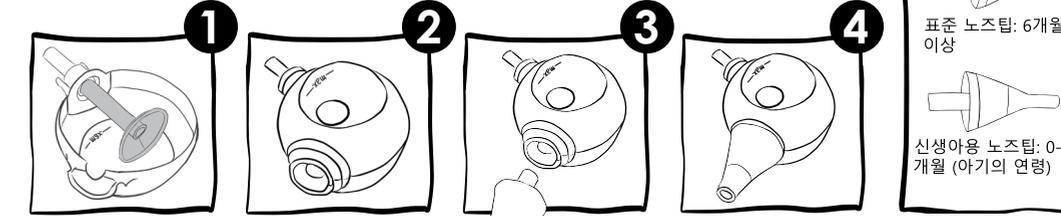

Colibri 헤드가 올바르게 조립되었는지, 역류 방지 이음부 브류 (역류방지팁)가 누락되었는지 확인해 주세요.

## 남은 부품을 조립하십시오



전원코드를 기계에 장착해주세요. 본 기계는 사용할 준비가 되었습니다.

연결튜브를 기계와 Colibri 헤드에 연결해주세요.

# 사용 및 설치 설명서

- 1** **알맞은 흡인 강도를 설정해주세요.**  
권장 흡인 강도 설정:  
\* 신생아(min): 가장 약한 강도  
\* 아기: 중간 강도  
\* 어린이, 미취학아동(max): 가장 강한 강도
- 2** **전원버튼을 눌러 기계의 전원을 켜고 5초 기다려 주십시오.**
- 3** **아이의 움직이지 않도록 잡아주세요.**  
\* 머리를 잡고 아이를 안정된 자세로 잡은 후, 아이의 코를 흡인해 주세요.  
\* 바운서 또는 아기전용의자에 앉힐 수도 있습니다.  
\* 아이가 앓을 수 있다면, 무릎에 앉혀주세요. 흡인 중에는 절대로 엎드리지 않도록 하세요.
- 4** **깨끗하고, 건조된 노즐팁을 아이의 콧구멍에 삽입하십시오.**  
노즐팁을 부드럽게 움직여 코 안의 모든 부위에 닿도록 해주세요.
- 5** **전원버튼을 이용하여 장치의 전원을 끄고 완전히 종료될 때까지 전원 콘센트에서 장치를 분리하지 마십시오. (최고 5초)**  
장시간 기계를 사용하지 않을 경우 콘센트를 분리해 보관해 주세요.  
작동 중에는 콘센트를 분리하지 마십시오. 콘센트를 연결하거나 분리할 경우에는 반드시 장치의 전원이 꺼진 뒤에 시행해야 합니다.

# 세척

- \* 연결튜브와 노즐팁을 장치에서 분리하고, Colibri 헤드를 분리하세요.
- \* 액체비누와 미지근한 물로 부품을 세척해 주세요.
- \* 브러시를 사용해 노즐팁을 세척합니다.
- \* 부품을 소독액에 담구어 사용할 수 있지만, 아이의 장비에 사용하기에 안전한지 꼭 확인해주세요.

- \* 연결 튜브를 세척하지 마십시오. 본 제품을 올바르게 사용하면, 튜브 내로 점액이 들어갈 수 없기 때문에 따로 세척할 필요가 없습니다.
- \* 하지만, 점액 또는 다른 액체가 튜브 내로 들어갔다면, 장치 사용을 멈추십시오. 튜브를 세척하고 완벽하게 건조해 주세요. 흐르는 물에 씻어 걸어 두시면 됩니다.
- \* 사용 후에는 에어 메쉬 상태를 체크해 주세요. 에어 메쉬 본체 연결 장치 아래 있습니다.
- \* 에어 메쉬 단단한 물체와 먼지가 본체 안에 들어가는 것을 방지합니다.
- \* 에어 메쉬점액이나 액체를 흡수하지 않습니다.
- \* 에어 메쉬 더럽거나 막힌 경우 교체할 수 있습니다.
- \* 본 장치를 올바르게 사용하면, 오랜 기간 동안 잘 작동할 것입니다.
- \* 다음 사용 전에 완벽히 건조해 주세요.
- \* 부드럽고 건조된 천으로 본체를 청소해주세요.
- \* 액체, 세제 또는 화학물질은 사용을 삼가주세요.
- \* 먼저, 직사광선 및 열이 없는 곳에 장치를 보관하십시오.

# 사용 팁

- \* 장치물질을 흡입하지 마십시오. 이 전기 기기로 수분을 흡수한다면 품질 보증서가 상실됩니다.
- \* 사용 중 장치 뒷면의 통풍구를 막지 마십시오. 통풍구를 통해 뜨거운 공기가 빠져나옵니다.
- \* 뜨거운 공기 및 열이 아이가 있는 곳과는 다른 방향으로 나가도록 위치해 주세요.
- \* 본 기계는 성인에 의해서만 사용되어 질 수 있습니다.
- \* 어린이가 기계를 가지고 놀지 못하게 해주세요. 장난감이 아닙니다.
- \* 건조하고 두꺼운 점액은 순한 식염수로 녹일 수 있습니다. 식염수 투입 후, 몇 분 정도 기다렸다가 티슈로 분비물을 닦아 낸 다음 지시에 따라 재사용하십시오.
- \* 한 번에 5ml 이상의 식염수를 사용하지 마십시오.